



ReadEasy *Move 2*

Snabbguide

Ansluta och packa upp kameran

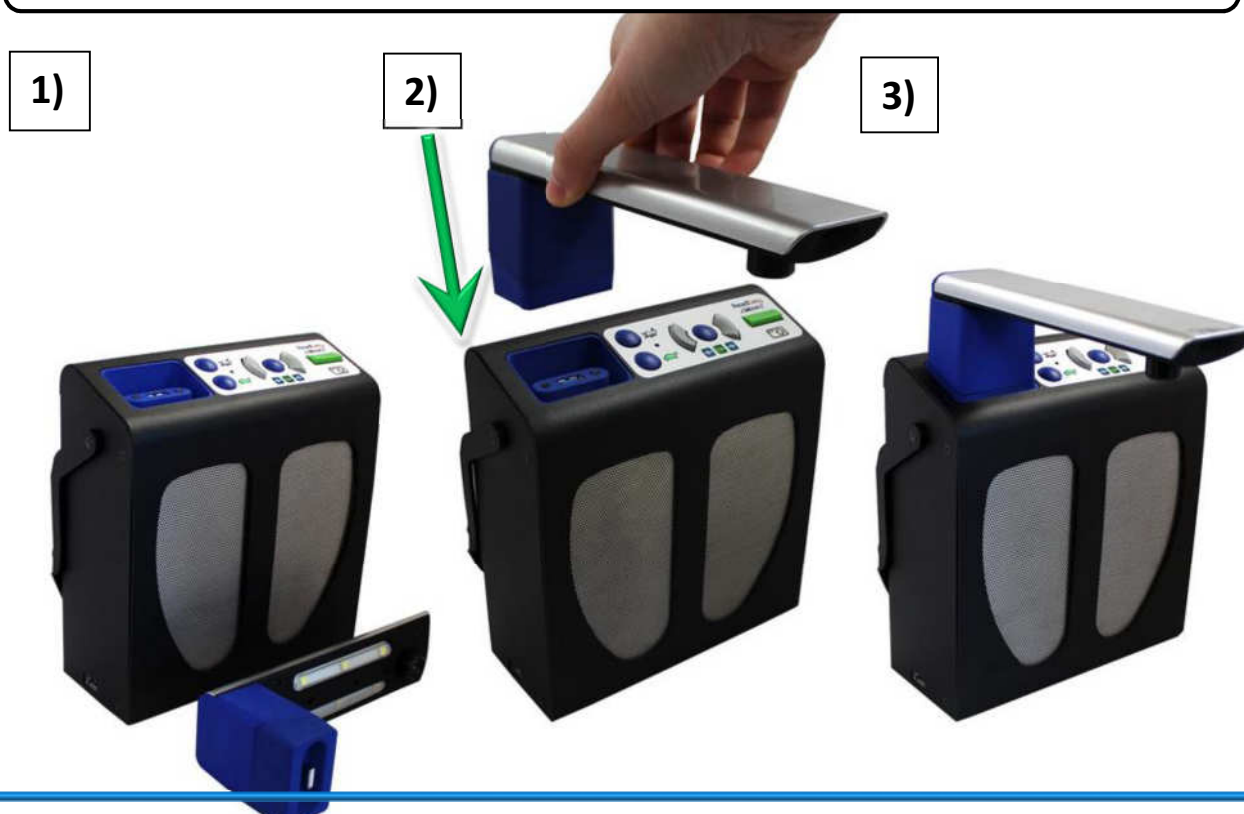

Kontroller

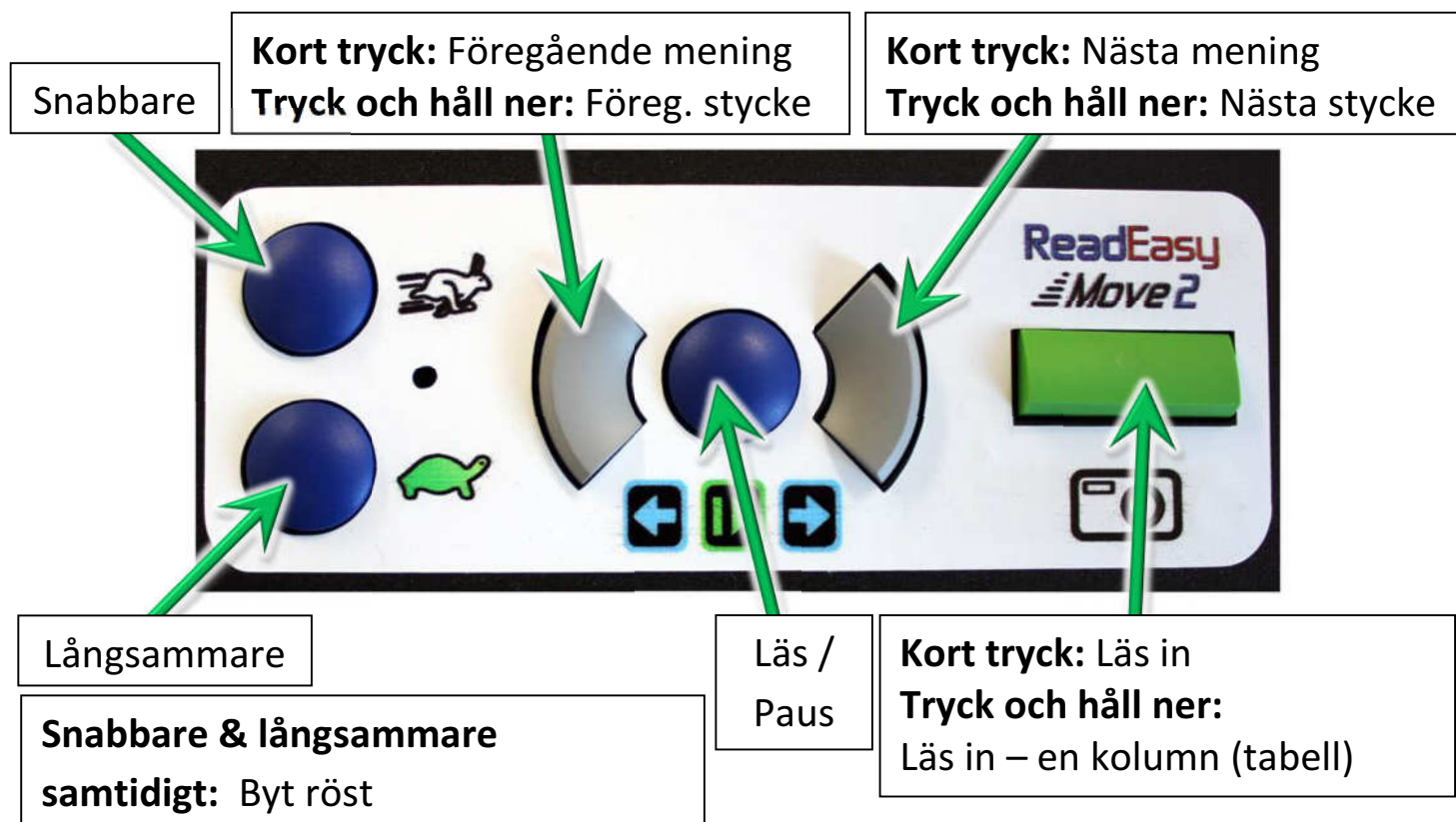

På / av, volym och hörlursuttag

För att slå på Read Easy Move se till att den är ansluten till strömnätet. Sedan trycker du på/av-knappen, på höger sida av maskinen, 2,5 cm från baksidan och 2,5 cm från toppen.

För att öka eller minska volymen, höj eller sänk volym reglaget. Den är placerad på den högra kanten av apparaten, nära framkanten.

För att använda hörlurarna, (eller andra med 3,5 mm kontakt), ansluter du dem till hörlursuttaget som finns på höger sidan, c:a 2 cm från framsidan och 2 cm upp från botten.



Omstart

Att tvinga ReadEasy Move 2 att starta om, tryck på och håll "Läs in" och "Snabbare" tillsammans. Detta krävs endast för sällsynta felsökningsändamål.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar som rör driften av din ReadEasy Move 2, kontakta ICAP AB på telefon 031 - 704 30 99 eller epost: info@icap.nu eller hemsidan www.icap.nu



Designed and Manufactured by



VisionAid International Ltd
Bridge Lodge,
Spalding Common
Spalding, Lincolnshire
PE11 3AU
England

Telephone:
+44 (0)1775 711 977

Email:
sales@visionaid-international.com