

ZoomText

Snabbkommando

Alt + Ins	Förstoring på
Alt + Del	Förstoring av
Alt + Num Plus	Öka förstoring
Alt + Num Minus	Minska förstoring
Ctrl + Skift + U	ZoomText's kontrollpanel
Ctrl + Skift + H	Hjälpverktyg

Alt + Pil upp	Skrolla Upp
Alt + Pil ner	Skrolla Ner
Alt + Pil vänster	Skrolla Vänster
Alt + Pil höger	Skrolla Höger
Alt + PgUp	Flytta bilden längst upp
Alt + PgDn	Flytta bilden längst ner
Alt + Home	Flytta bilden åt vänster

Alt + End	Flytta bilden åt höger
Alt + Num 5	Flytta bilden till mitten
Alt + Num /	Spara vy
Alt + Num *	Återställ vy

Ctrl + Skift + Z	Fönstertyp
Ctrl + Skift + A	Justera fönster-verktyg
WIN + Skift + D	Dubbla bildskärmar På/Av
WIN + Skift + Z	Ändra läge
Ctrl + Skift + N	LåsBild
Ctrl + Skift + E	LåsFönster På/Av
Ctrl + Skift + C	Färgfilter På/Av



ZoomText

Ctrl + Skift + P	Pekarinställning På/Av	Ctrl + Alt + Skift + H	Markering hittad
Ctrl + Skift + R	Markörinställning På/Av	Ctrl + Alt + Skift + P	Programinformation
Ctrl + Skift + O	Focus inställning På/Av	Ctrl + Alt + Skift + M	MSAA På/Av
Ctrl + Skift + F	Fontinställning	Ctrl + Alt + Skift + T	Följning På/Av
Ctrl + Skift + D	Skrivbordssökare	Ctrl + Alt + Skift + U	Uppdatera skärmbilden
Ctrl + Skift + W	Websökare	Alt + Skift + 1, 2, ...osv, 0	Ladda inställningsfil 1, 2, ...osv, 0
Ctrl + Skift + T	Text Sökare	Ctrl + Skift + S	Spara programmets inställningsfil
Ctrl + Skift + L	Lokalisator På/Av		
Ctrl + Skift + V	Översikt På/Av		
Ctrl + Skift + B	Flytta mus till vy	Alt + Ins	Inloggningsstöd på
Ctrl + Skift + Y	Flytta vy till mus	Alt + Del	Inloggningsstöd av
Alt + Paus	Släpp igenom tangent	Alt + Num Plus	Öka förstoring
Ctrl + Alt + Skift + A	AHOI På/Av	Alt + Num Minus	Minska förstoring
Ctrl + Alt + Skift + C	Fånga skärmbild	Ctrl + Skift + C	Invertering På/Av
Ctrl + Alt + Skift + D	Markörspårning	Alt + Skift + S	Tal På/Av



ZoomText

Alt + Skift + A	AppLäsare	Alt + Skift + V	Läsnivå
Alt + Skift + Vä musklick	Läs från pekarmarkör	Alt + Skift + A	AppLäsare
Alt + Skift + D	DokLäsare	Alt + Skift + D	DokLäsare
Enter	Börja läsning (Start/Paus)	Alt + Skift + I	”SägDet” verktyg
Alt + Num Plus	Öka förstoring		
Alt + Num Minus	Minska förstoring	Ctrl + WIN + W	Läs fönstertitel
Ctrl + Num Plus	Öka läshastigheten	Ctrl + WIN + T	Läs dialogflik
Ctrl + Num Minus	Minska läshastigheten	Ctrl + WIN + M	Läs dialogmeddelande
Ctrl	Tysta läsaren	Ctrl + WIN + F	Läs Fokus
ESC	Gå ur läsare	Ctrl + WIN + B	Läs Grundknapp
Alt + Skift + S	Tal På/Av	Ctrl + WIN + G	Läs Gruppnamn
Ctrl + Num Plus	Öka talhastigheten	Ctrl + WIN + X	Läs Statusrad
Ctrl + Num Minus	Minska talhastigheten	Ctrl + WIN + A	Läs Allt
Alt + Skift + T	Skriveko	Ctrl + WIN + S	Läs vald text
Alt + Skift + M	Museko	Ctrl + WIN + R	Läs Cellens radtitel



ZoomText

Ctrl + WIN + K	Läs Cellens kolumntitel	Pil ner	Läs ord nedanför
Ctrl + WIN + O	Läs Cellens formel	Ctrl + WIN + Pil vä.	Läs föregående mening
Ctrl + WIN + C	Läs cell kommentar	Ctrl + WIN + Num 5	Läs aktuell mening
Ctrl + WIN + I	Säg tiden	Ctrl + WIN + Pil hö.	Läs nästa mening
Ctrl + WIN + Y	Säg datum	Ctrl + Pil upp	Läs föregående stycke
Alt + Skift + C	Läs klippbord	Ctrl + Skift + Num 5	Läs aktuellt stycke
Ctrl	Tyst	Ctrl + Pil ner	Läs nästa stycke
Alt + Skift + E	Byt talsyntes	Home	Läs första ordet på raden
Ctrl + Pil vänster, eller		End	Läs sista ordet på raden
Pil vänster	Läs föregående ord	Page Up	Sida upp
Ctrl + Num 5, eller		Page Ner	Sida ner
MELLANSL.	Läs aktuellt ord	Ctrl + Home	Början av dokument
Ctrl + Pil höger, eller		Ctrl + End	Slutet av dokument
Pil höger	Läs nästa ord		
Pil upp	Läs ord ovanför		



ZoomText

TAB	Nästa Länk	Ctrl + Pil upp	Läs föregående stycke
Skift + TAB	Föregående Länk	Ctrl + Skift + Num 5	Läs aktuellt stycke
Ctrl + Enter	Markera Länk	Ctrl + Pil ner	Läs nästa stycke
Pil vänster	Läs föregående bokstav	Ctrl + WIN + 1, 2, ...0	Aktivera Zon 1, 2, ...0
Num 5	Läs aktuell bokstav	Ctrl + WIN + N	Nästa läszon
Pil höger	Läs nästa bokstav	Ctrl + WIN + P	Föregående läszon
Ctrl + Pil vänster	Läs föregående ord	Ctrl + WIN + L	Lista läszoner
Ctrl + Num 5	Läs aktuellt ord	Ctrl + WIN + V	Navigera läszoner
Ctrl + Pil höger	Läs nästa ord	Ctrl + WIN + Z	Ny läszon
Ctrl + WIN + Pil vänster	Läs föregående mening	Ctrl + WIN + E	Ändra läszon
Ctrl + WIN + Num 5	Läs aktuell mening		
Ctrl + WIN + Pil höger	Läs nästa mening		
Pil upp	Läs föregående rad		
Skift + Num 5	Läs aktuell rad		
Pil ner	Läs nästa rad		



Webb användning

Ctrl + Skift + W	Starta Webbsökare	Ctrl + Skift + 1 ...osv.. 6	Föregående rubrik nivå 1 ...osv... 6
ESC	Avsluta Webbsökare		
Enter eller Ctrl + Pil hö.	Nästa objekt	Ctrl + F	Nästa Formulär
Skift + Enter eller Ctrl+ Pil vä.	Föregående objekt	Ctrl + Skift + F	Föregående Formulär
Ctrl + Home	Första objektet (i filtrerad lista)	Ctrl + T	Nästa Tabell
Ctrl + End	Sista objektet (i filtrerad lista)	Ctrl + Skift + T	Föregående Tabell
Ctrl + Enter	Aktivera	Ctrl + L	Nästa Länk
Alt + L	Växla listsökning (öppna/stäng)	Ctrl + Skift + L	Föregående Länk
Ctrl + Pil upp	Växla Sidobjekt uppåt	Ctrl + C	Nästa Kontroll
Ctrl + Pil ner	Växla Sidobjekt nedåt	Ctrl + Skift + C	Föregående Kontroll
Ctrl + H	Nästa rubrik	Ctrl + I	Nästa Bild
Ctrl + Skift + H	Föregående rubrik	Ctrl + Skift + I	Föregående Bild
Ctrl + 1 ...osv .. 6	Nästa rubrik nivå 1 ...osv... 6	Ctrl + S	Nästa Lista
		Ctrl + Skift + S	Föregående Lista



Bakgrundsläsning (BGR) Caps I. = Caps Lock

Caps I.+ C	BGR Läs upp urklipp
Caps I.+ S	BGR Läs upp vald text
Caps I.+ Enter	BGR Play / Paus
Caps I.+ Backsteg	BGR Omstart (från början)
Caps I.+ Pil höger	BGR Nästa mening
Caps I.+ mellansl.	BGR Nuvarande mening
Caps I.+ Pil vänster	BGR Föregående mening
Ctrl + Caps I.+ Pil höger	BGR Nästa ord
Ctrl + Caps I.+ mellansl.	BGR Nuvarande ord
Ctrl + Caps I.+ Pil vä.	BGR Föregående ord
Caps I.+ T	BGR Visa verktygsfältet
Caps I.+ ESC	BGR Avsluta

Ctrl + WIN + Enter	Kamera På/Av
Caps I.+ C	Bakgrundsläsare
Ctrl + Caps I.+ C	Inspelare (starta)
Ctrl + Caps I.+ C	Spela in urklipp
Ctrl + Caps I.+ S	Spela in vald text

Kameraanvändning

Ctrl + Alt + WIN + Enter Kamera På/Av

Ctrl + Alt + WIN + T Kamera Verktygsfält

Ctrl + Alt + WIN + Pg Up Kamera Zooma in

Ctrl + Alt + WIN + PG Up Kamera Zooma ut

Ctrl + Alt + WIN + mellansl. Kamera vy: Hel/Delad

Ctrl + Alt + WIN + D Kamera vy: Växla delning

Ctrl + Alt + WIN + R Kamera vy: Roterar bild

Ctrl + Alt + WIN + M Kamera: Manuell Fokus På/Av

Ctrl + Alt + WIN + Pil höger: Kamera Manuell Fokus in

Ctrl + Alt + WIN + Pil vänster: Kamera Manuell Fokus ut

Alt + WIN + C Kamera Inställning På/Av

Alt + WIN + R Kamera Inställning Återställ

Alt + WIN + Pg Up Kamera öka Ljustyrka

Alt + WIN + Pg Dn Kamera minska Ljustyrka

Alt + WIN + Pil höger Kamera öka Kontrast

Alt + WIN + Pil vänster Kamera minska Kontrast

Alt + WIN + mellansl. Kamera Två-Färg På/Av

Alt + WIN + S Kamera Två-Färg Schema

